

キュアブラ

～ 術後の出血防止と創部の保護 ～

監修

JCHO徳山中央病院 乳腺外科 主任部長 山本 滋 先生
 山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学講座
 協力：山口県産業技術センター



本製品には山口大学の研究成果が
 利用されています。




ファスナーの
 肌への接触を
 防止

通気性生地で
 ムレ・カブレ防止

三方開きのため
 手術後直ちに
 着用可能

退院後も
 通常パッドを入れ
 使用可能

▼ エアパッド

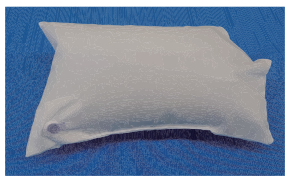

エアパッドをキュアブラにセットして
 加圧ポンプ(付属品)で膨らませること
 により止血し皮膚を定着します。

▼ 加圧ポンプ



両脇開き
 (マジックテープ付)
 で微調整可能

裾はずれにくい
 幅広ゴムを使用

空気注入により
 患者に合った
 加圧調整可能

創部を
 均一加圧

〔標準仕様〕

商品名	標準価格
キュアブラ	12,540円(税込)

○注文時にエアパッドの左・右をご指定ください。

	バスト	アンダー (cm)
M	86～92	75～80
L	92～98	80～85
LL	98～104	85～90

カラー：ベージュ




FAX・電話、またはインターネットで
 注文を受け付けております。
 インターネットでの注文はQRコード
 を読み込んでおこなってください。

URL: <https://cs-mk.co.jp/curebra2/>

■材質
 本体：ポリエステル86%、ポリウレタン14%
 エアパッド：ウレタン100%

使用上の注意

- ・本品は乳房全切除後専用です。医師の指示に従ってご使用ください。
- ・エアパッドを膨らませる際は空気の入れすぎに注意してください。
- ・本品の使用中に湿疹、痛み、しびれ等の異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

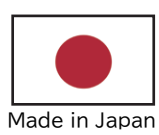

アピアランスケア助成金
 対象商品
 詳細はこちら→

